

Информация о версии программного обеспечения GeneXpert® Dx 6.5a

Настоящий документ содержит новую информацию, известные ограничения и разъяснения, не приведенные в *Руководстве оператора системы GeneXpert Dx*.

Информация по установке и использованию

Пожалуйста, обратитесь к следующим документам для получения инструкций по установке и использованию программного обеспечения версии 6.5a:

- Инструкция по установке GeneXpert Dx, версия 6.5, ред. D (№ документа 302-4071-RU)
- Руководство оператора GeneXpert Dx, версия 6.5, ред. C (№ документа 303-3411) для IVD
- Руководство оператора GeneXpert Dx, версия 6.5, ред. E (№ документа 302-8378-RU) для CE-IVD
- Информационный буклет о многоязычной версии GeneXpert Dx для Windows 11 (№ документа 303-5234)

Документы версии 6.5 также применимы к версии 6.5a, поскольку в инструкциях не было внесено никаких изменений по сравнению с версией 6.5.

1. Новые функции

Это обновление включает следующие изменения:

- Обновление до последней версии OpenJDK 8 с целью внедрения важных улучшений безопасности
- Программное обеспечение теперь можно устанавливать на системы с Windows 11

2. Устраненные проблемы

В последнем выпуске устранены проблемы, известные в предыдущих редакциях программного обеспечения:

- Удаленные пользователи теперь обязаны вводить пароль при входе в систему при включенном LDAP

3. Известные проблемы

3.1. Создание анализа

Осторожно:

Компания Serheid рекомендует всегда подтверждать соответствие результатов, которые отправляются в ЛИС, результатам тестов в системе GeneXpert после внесения каких-либо изменений в конфигурацию GeneXpert или главного компьютера, включая (но не ограничиваясь перечисленным) следующие изменения:

- версия программного обеспечения GeneXpert
- версия описания тестов GeneXpert
- настройки связи главного компьютера GeneXpert
- изменения связующего программного обеспечения главного компьютера или его конфигурации

Информация о версии программного обеспечения GeneXpert® Dx 6.5a

- изменения в программном обеспечении или конфигурации ЛИС

3.2. Создание анализа

- 3.2.1. Не сканируйте штрихкод в поле ID пациента (Patient ID) или ID образца (Sample ID) диалогового окна Создать анализ (Create Test), если вы уже вносили изменения в указанное поле. Сканирование штрихкода после внесения изменений в поле приведет к сканированию неверных знаков. Чтобы обновить поле ID пациента (Patient ID) или ID образца (Sample ID), закройте диалоговое окно Создать анализ (Create Test), а затем вновь выберите Создать анализ (Create Test) и просканируйте штрихкод идентификатора.
- 3.2.2. GX Dx 4.6 и более поздние версии не поддерживают сочетание анализов BA 4-Plex и BG Duplex.

3.3. Преобразование базы данных

- 3.3.1. Проблемы с переносом базы данных можно свести к минимуму, выполнив следующие действия:
 - 3.3.1.1. Запустите установщик и выберите Выборочная установка (Custom install)
 - 3.3.1.2. На экране Выборочная установка (Custom install) выберите Чистая база данных (Clean Database)
 - 3.3.1.3. Следуйте выводимым на экране инструкциям для завершения установки программного обеспечения
 - 3.3.1.4. Для преобразования и восстановления базы данных обратитесь в службу технической поддержки компании Cepheid

3.4. Локализация

- 3.4.1. При использовании программного обеспечения GeneXpert в конфигурации на русском языке диалоговые окна выбора файлов содержат некоторые надписи на английском языке, не переведенные на русский. Это касается диалогового окна **Сохранить (Save)**, которое открывается из окна Архивировать тест (Archive Test), диалогового окна **Открыть (Open)**, которое открывается из окон Извлечь тест (Retrieve Test), Резервное копирование базы данных (Database Backup) и диалогового окна **Выбрать файл (Select File)**, которое открывается из окна Восстановление базы данных (Database Restore).

Отсутствует перевод следующих выражений:

"Look In" – "Найти в"
"File Name" – "Имя файла"
"Files of Type" – "Тип файлов"
"Cancel" – "Отмена"
"Open" – "Открыть"

3.5. Лицензионное соглашение на программное обеспечение

- 3.5.1. Во время установки пользователь может не иметь возможности распечатать лицензионное соглашение на программное обеспечение в операционной системе Windows 11. Чтобы обеспечить возможность печати до установки, пользователь может назначить Apache Open Office приложением по умолчанию для файлов формата .rtf, если оно установлено в системе. В качестве альтернативы соглашение

Информация о версии программного обеспечения GeneXpert® Dx 6.5a

можно распечатать после установки, открыв PDF-версию лицензионного соглашения с экрана О программе (About) в приложении Dx.